



• DE •

REF

4.10.1



Nea International bv  
Europalaan 31  
6199 AB Maastricht-Airport  
Die Niederlande

[www.push.eu](http://www.push.eu)

Entworfen in den  
Niederlanden  
Hergestellt in der EU

02 / 2025

MD

Medical Device



© Nea

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen  
von Nea International bv

## PUSH SPORTS HANDGELENKBANDAGE

Die Push Sports Handgelenkbandage stabilisiert das Handgelenk, während die Handinnenfläche frei bleibt.

Die Bandage sorgt für eine Bewegungseinschränkung, ohne das Gelenk zu immobilisieren, sodass man weiterhin ganz normal Sport treiben kann. Mit dem elastischen Band bestimmen Sie selbst die Stärke des Drucks. Die Handgelenkbandage kann mühelos mit einer Hand angelegt werden. Das schnelltrocknende Material fühlt sich sehr komfortabel an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### WANN TRÄGT MAN DIE PUSH SPORTS HANDGELENKBANDAGE?

Zur Prävention von rezidivierenden Überlastungsbeschwerden im Handgelenk kann die Push Sports Handgelenkbandage hilfreich sein, weil sie die Belastung des beweglichen aber verletzlichen Handgelenks verringert. Schmerzbeschwerden können durch eine Überlastung der Sehnen des Handgelenks und der Hand entstehen.

### INDIKATIONEN

- Sekundärprävention nach Verletzungen des Handgelenks
- Distorsionen
- Schmerzbeschwerden des Handgelenks
- Instabilität des Handgelenks

### GEGENANZEIGEN

- Es sind keine Verletzungen bekannt, bei denen die Push Sports Handgelenkbandage nicht getragen werden kann oder darf.

### BEOBACHTEN

- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Bandage nicht zu fest anlegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bandage nur bei der richtigen Indikation tragen. Die korrekte Verwendung Ihrer Push Sports Bandage erfordert möglicherweise eine Diagnose durch einen Arzt oder Therapeuten. Schmerz ist immer ein Warnzeichen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Beschwerden ohne deutliche Ursache empfiehlt sich daher, Ihren Hausarzt, Physiotherapeuten oder Sportarzt um Rat zu fragen.
- Push Sports Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Material abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vorzugsweise vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Achten Sie beim Online-Kauf darauf, dass Ihnen ein guter Rückgabeservice geboten wird. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Sports Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Sports Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Sports Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Die Push Sports Handgelenkbandage hilft, die Belastung des beweglichen aber verletzlichen Handgelenks zu verringern. In die Handgelenkbandage sind Führungsstäbe eingearbeitet, die die Beugung des Handgelenks einschränken. Die Bandage wird mit einem elastischen Band geschlossen. Dieses Band hält die Führungsstäbe an ihrer vorgesehenen Stelle, bietet einen angenehmen Druck rund um das Handgelenk und verstärkt die unterstützende Wirkung der Führungsstäbe.

### ANMESSEN

Die Push Sports Handgelenkbandage ist in drei Größen und in einer linken und einer rechten Ausführung erhältlich. Um die richtige Größe zu ermitteln, messen Sie den Umfang Ihres Handgelenks.



### ANLEGEN

- ① Stecken Sie Ihren Daumen in die dazu vorgesehene Öffnung der Bandage. Die Schnalle zum Verschließen befindet sich auf dem Handrücken.
- ② Bringen Sie das elastische Band rund um das Handgelenk auf Spannung und verschließen Sie es mit dem Klettverschluss. Mit der Schnalle kann das elastische Band sehr einfach fester angezogen werden.

[pushsports.eu/wrist-brace/applying](https://www.pushsports.eu/wrist-brace/applying)

Für Informationen zum Vertreter in Ihrem Land siehe bitte unsere Website [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

### WASCHANLEITUNG / PFLEGE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen. Dieses Band hält die Führungsstäbe an ihrer vorgesehenen Stelle, bietet einen angenehmen Druck rund um das Handgelenk und verstärkt die unterstützende Wirkung der Führungsstäbe. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Lassen Sie die Bandage an der Luft trocknen (nicht auf einer Heizung oder im Wäschetrockner). Bewahren Sie die Bandage niemals feucht auf, sondern lassen Sie sie erst vollständig trocknen.



1



2



3

### Materialzusammensetzung

Polyamid	35%
Polyester	28%
Stahl	13%
Polyurethan	8%
Elastan	5%
Sonstige	11%
Enthält kein Latex	